
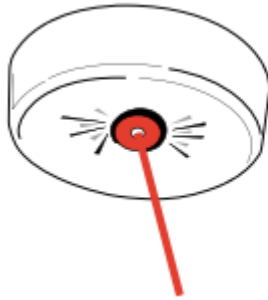


NC951 vartotojo instrukcija

Pagrindinės sistemos funkcijos:

Iškvietimas.


WC viduje

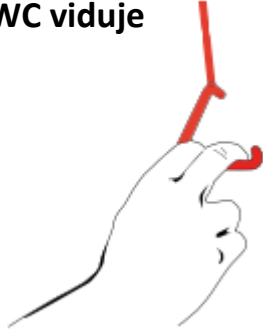

Prireikus pagalbos, aliarmas aktyvuojamas patraukus virvelę.

Užsidegęs raudonas LED indikatorius ant iškvietimo ir atstatymo mygtuko bei įsijungęs ištinis garsinis indikatorius patvirtina, kad iškvietimas sėkmingai aktyvuotas

WC išorėje

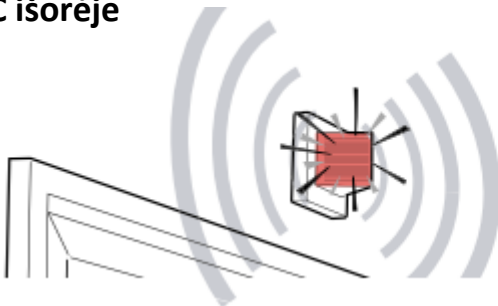


Įsijungia virš durų esančio indikatoriaus šviesos ir garso indikacija, parodanti, kur reikalinga pagalba

Įsijungia ant valdiklio esantis raudonas „Calling“ indikatorius bei garsinis signalas, personalui parodantys, kad reikalinga pagalba


Iškvietimo priėmimas ir sistemos atstatymas.

WC išorėje

Atsakingas asmuo priima iškvietimą paspausdamas „Call Accept“ mygtuką

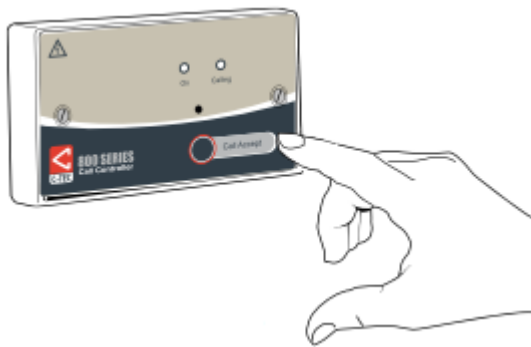

WC viduje

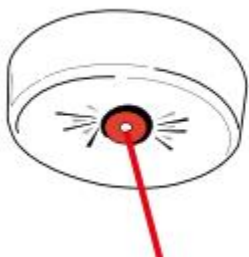

Raudonas LED indikatorius ant iškvietimo ir atstatymo mygtuko lieka šviesti, garsinis signalas įsijungia su pertraukimas, indikuodami, kad pagalba kelyje.

Kai pagalba suteikta, sistemos atstatymui reikia paspausti „Reset“ mygtuką. Sistema grįžta į budėjimo režimą.